

FIRIN PROGRAMI

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kurutma Zamanı	dak.	5	5	5	5	3	7	10	15	5	10	7	3
Düşük Isı	c	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Vakum Başlatma	c	500	500	500	500	500	500	500	500	-	-	-	500
Isı Artışı	C/dak.	50	50	50	50	50	40	40	40	50	50	50	50
Vakum Seviyesi	cm/Hg	72	72	72	72	65	72	72	72	-	-	-	74
Vakum Bırakma Isısı	c	790	790	770	760	720	750	760	770	-	-	-	790
Bekletme Süresi	dak.	-	0.25-0.5	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	3
Yüksek Isı	c	800	800	780	770	730	760	770	770	760	770	750	800



FIRINLAMA REHBERİ

1. Bonding Porseleni (1-6 üye için)
2. Bonding Porseleni (7 üyeden fazla)
3. Opak
4. Marjin Porseleni
5. MRP
6. Dentin/Şeffaf (Tek üye) (1. ve 2. Pişim)
7. Dentin/Şeffaf (2-6 üye için) (1. ve 2. pişim)
8. Dentin/Şeffaf (6 üyeden fazla) (1. ve 2. pişim)
9. Glazür (3 üye için)
10. Glazür (3'ten fazla üye için)
11. Glazür (Glazür tozu)
12. Saf titanyumun oksidasyonu

Yukarıdaki program sadece rehber olarak verilmiştir. Fırınlama sıcaklıkları farklı fırın çeşitlerine ve kalibrasyona göre değişebilir.