

## Olası Problemler ve Çözüm Önerileri

### Porselen / Metal Separasyonu

#### I- Hasta ağızında porselenin metalden ayrılması

Neden (1) : Porselen metal ile iyi bir bağlanma formunda değildir.

- Eğer porselen koyu metal oksite yapışmış ise bu metal çok kalın metal oksit tabakası üretmiş demektir, bunun sebebi muhtemelen arka arkaya fırınlama olabilir. Bu problem genellikle %80 Pd içeriği olan metallerde ve %50-60 Pd + %30-40 Ag içeriği olan metallerde meydana gelir. Lütfen %50 Au+%30 Pd+%5 Ag kombinasyonu olan metallerin kullanımını tercih ediniz.

Neden (2) : Occlusal güç uygun değil. Eğer opak metale çok kuvvetli bir şekilde bağlanmış ise bu problem ortaya çıkabilir.

- Bir kaç kez artikülasyon kontrolü yapın ve occlusyonu model üzerinde ayarlayın ve doktora bu durumu dikkatlice kontrol etmesi gerektiğini hatırlatın.

Neden (3) : Yapıştırıcı ajan uygun bağlanmayı sağlamamıştır.

- Düşük bağ gücü olan yapıştırıcı ajan kullanmamaya dikkat edin. Eğer altın yapıştırıcı ajan kullanıyorsanız (gold bonding agent) bunlar porselen parçaları içerir, toz opak ile wash bake yapılmıştır, Daha sonra ajanı toz opak ile üzerine uygulayın. Bu ürün ile pasta opak kullanılmaz.