

Olası Problemler ve Çözüm Önerileri

Yeşillenme

I- Opak Pasta Ni-Cr, Berilyum içermeyen metal üzerine uygulandığında yeşillenme oluyor.

- Berilyum içermeyen metal (WIRON99, REMANIUM gibi.) için yüzey işlemi için lütfen metal üretici firmanın verdiği talimatları izleyin.
- Opak Pasta Modifier Orange (turuncu) yada Yeni Opak Pasta BA uygulaması yaparken dikkatli olun özellikle marginde. Eğer metal parça kapatılmamışsa bu yeşillenmeye neden olabilir.
- İlk Opak fırınlaması özel belirlenmiş bir ısıdadır. Belirlenmiş bu ısıdan daha düşük sıcaklıkta fırınlama yapılmamalıdır.
- Belirtilen özel renklerin uygulamasında, ilk fırınlamada turuncu rengi maskeleyecek şekilde uygulama yapın.
- İkinci Opak fırınlaması özel belirlenmiş bir ısıdadır. Belirlenmiş bu ısıdan daha düşük sıcaklıkta fırınlama yapılmamalıdır.
- Opak yüzeyini fırça ile akan su altında temizleyin. Gümüş (silver) iyonlarının temizlenmemesi yeşillenmeye neden olabilir.
- Dentin, Şeffaf ve Transpa porselen katını önerilen, olağan şekilde yükleyin ve fırınlama yapın.